


## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЗАЖИМА LIGASURE В СОСТАВЕ С ГЕНЕРАТОРОМ EK-300M1

Строго придерживайтесь требований эксплуатации оборудования, приведенных в сопроводительной документации на инструмент и генератор.

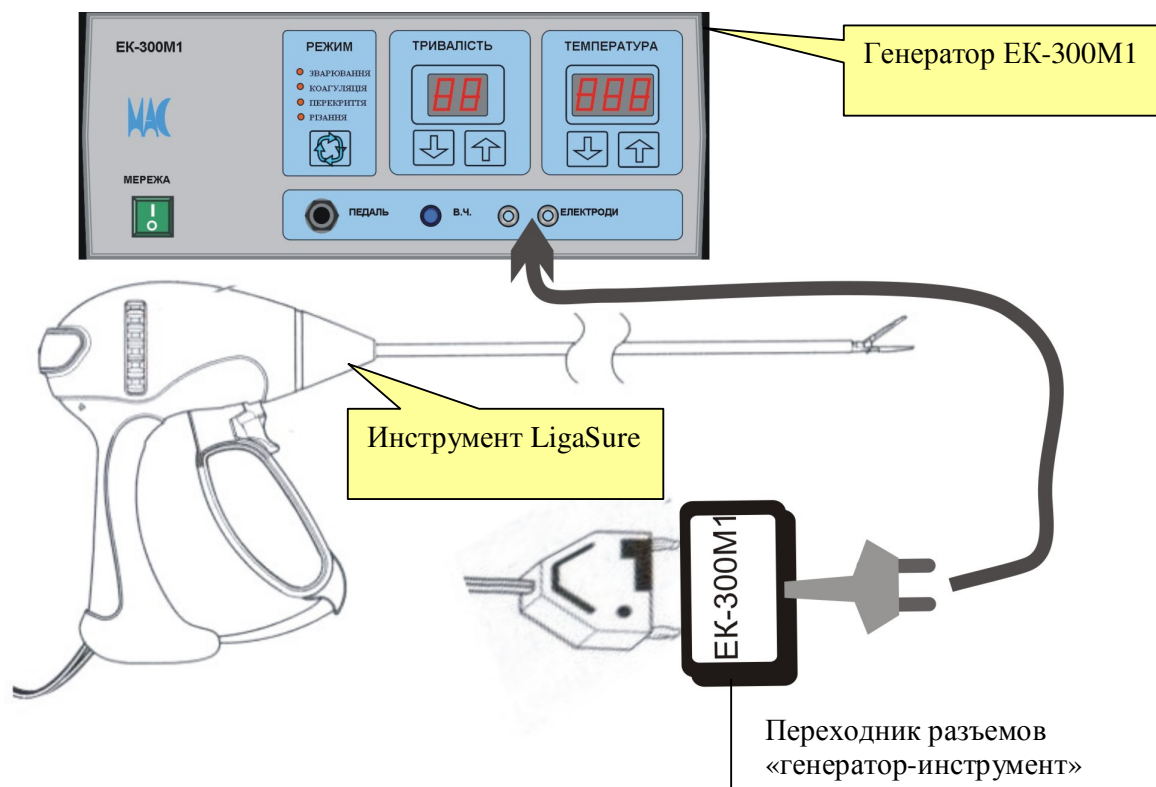

По результатам испытаний допускается применение инструмента в составе генератора EK-300M1, с учетом следующих рекомендаций:

### Порядок работы:

1. Подключите инструмент к генератору (используя переходник), как показано на рисунке.
2. Выберите требуемый режим работы генератора и установите температуру воздействия от 5 до 50 . (**Рекомендуется использовать инструмент в составе генератора EK-300M1 в автоматическом режиме «Зваривання» для заваривания сосудов.**)
3. Осуществите захват ткани инструментом и инициируйте электрохирургическое воздействие путем нажатия на педаль генератора.
4. Убедитесь, что шов получен: толщина ткани после воздействия не превышает 0,8мм. При необходимости – повторите.
5. Осуществите рассечение ткани вдоль шва, приведя в действие нож инструмента и удерживая его бранши закрытыми.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. устанавливать мощность воздействия для значений температуры 60 и выше
2. превышать длительность воздействия для максимальной мощности 30 сек.
3. использовать режим генератора «Різання» (для этого используйте встроенный нож инструмента).